

Cages de retournement

VIR OVIN- CAPRIN (0400612)

VIR OVIN-CAPRIN MEGA (0400727)



Appareil de contention pour les soins des pieds, l'échographie ou autre intervention. Contrairement aux cages à basculement latérale, le berceau pivote facilement dans le sens du couloir avec l'aide de vérins à gaz. L'animal se trouve assis et maintenu sous le poitrail sans mouvement de panique, à bonne hauteur pour l'opérateur. Appareil métallique galvanisé.

Nouvelle version avec des renforcements supplémentaires et un système de barrage automatique au sol pour éviter que les animaux passent sous l'animal déjà relevé.

Le modèle Vir Ovin Caprin Méga est identique au modèle classique, mais renforcé (2 vérins au lieu de 1), réhaussé et rallongé pour permettre le passage d'animaux de 70 à 120 kg. Modèle conseillé pour les caprins.

Mise en service.

Pour le transport, une bride fixe le berceau sur sa butée (côté gauche de la machine vers l'avant). Le couper pour pouvoir manœuvrer l'appareil.

Le vérin du poussoir et celui du maintien de la brebis sous le poitrail sont munis de verrous de blocage. Il faut les inverser pour les manœuvrer.

Le Vir' Ovin Caprin s'intègre dans un couloir, ou peut se mettre dans une case où les animaux sont serrés.

Mode d'emploi

1 Mettre le verrou N°1 en position vers l'avant. Tirer le levier N°1 vers l'avant. Le poussoir se lève. Le verrou N° 1 se repositionne alors automatiquement vers l'arrière.



2 Introduire l'animal dans le Vir Ovin-Caprin.



3 Inverser le verrou N°1 vers l'arrière. Tirer le levier N° 1 vers l'arrière. Le poussoir vient en contact avec la croupe de l'animal Aider la bête à s'engager jusqu'à l'avant du Vir Ovin-Caprin. Le plancher en caillebotis plastique empêche l'animal de glisser.

4 Mettre le verrou N°2 en position avant. Tirer sur le levier N°2 vers l'avant. Les deux palettes de contention se rabattent sur le poitrail de l'animal.



5 Déverrouillez le verrou N°3 au niveau de la poignée, sur le côté avant droit de l'appareil. L'ensemble se libère et sous la poussée du vérin à gaz, le berceau pivote vers l'arrière en mettant la brebis ou la chèvre en position assise. L'opérateur accompagne le mouvement de rotation à l'aide de la poignée. Le système arrière « anti-intrusion » se relève, évitant l'avancement dans la cage de l'animal suivant.



6 Faire le travail de taille ou de parage des onglons. Grâce à cet appareil on peut également faire une échographie, poser une boucle, faire un tatouage ou tous soins nécessaires à l'animal. Les pattes avant et arrière sont à bonne hauteur pour travailler, l'animal est maintenu assis sur le pousoir, il reste calme, sans risque pour les mamelles. Un repose tête assure le confort et la stabilité, la position n'est pas douloureuse.



7 Le travail terminé, ramener le berceau en position basse en accompagnant le mouvement avec la poignée vers l'avant. Le poids de l'animal facilite le réenclenchement du berceau.

8 Mettre le verrou N° 2 en position arrière. Amener le levier N°2 vers l'arrière. Les palettes de contention s'ouvrent et libèrent l'animal.

9 Ouvrir la porte avant en levant le loquet. Laisser sortir l'animal et refermer la porte en la ramenant sur la cage. Le Vir Ovin-Caprin est prêt pour la prise d'un autre animal.



Possibilités de réglages

a- Deux hauteurs de réglage du berceau (3 pour la méga) suivant le gabarit de l'ensemble des animaux.

b - Le changement de hauteur amène à rehausser ou rabaisser le verrou N°3 à la poignée de retournement et la butée d'arrêt du berceau qui coulisent dans une gorge.

Réglez également la hauteur du vérin de retournement en boulonnant dans les trous correspondants à la hauteur du berceau.

c- Les palettes de contention peuvent aussi être réglées un peu plus en avant ou en arrière sur leurs coulisses.

On réglerà en même temps les tendeurs à vis montés sur le levier de serrage N°2

Entretien

Huilez très légèrement les verrous si nécessaire. Le nettoyage et la désinfection du Vir Ovin-Caprin après chaque séance de parage des onglons est important sur le plan sanitaire et pour la longévité du matériel. La présence d'un plancher en caillebotis plastique rend ce nettoyage plus facile.

Dimensions

Longueur	1,45 m (1.55 m pour la méga)
Largeur extérieure	0,60 mintérieure.....0,55 m
Largeur du berceau	0,45 mhauteur.....0,90 m
Poids	70 kg (90 kg pour la méga)

Option

Kit caprin (0400732) : A fixer sur le berceau du Vir Ovin-Caprin pour un maintien parfait du dos « pointu » des caprins.

